



VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR A MAIS BONITA E MODERNA MINI INCUBADORA DO BRASIL.

Siga as instruções de uso e obtenha o melhor resultado e durabilidade do equipamento



Advertências:
 Manter fora do alcance de crianças;
 Nunca encoste na plataforma de aquecimento, esta região fica aquecida e pode ocasionar queimaduras.

CONSERVAÇÃO

Conservar o produto em local seco, ao abrigo da luz solar.

Manter o produto na embalagem original.

A limpeza da 2i Mini Incubadora deve ser feita com pano macio, água e sabão neutro. O uso de outros produtos químicos pode causar danos ao equipamento.

RESULTADOS

- A ampola que não foi autoclavada deverá apresentar uma coloração amarela, confirmando que os microrganismos foram capazes de crescer.

- A ampola que foi autoclavada (passou pelo processo de esterilização) deverá permanecer com a coloração roxa, confirmando que a esterilização foi bem sucedida. Observe ainda que após a esterilização, o indicador químico da etiqueta deverá mudar de rosa para marrom.

- Se as duas ampolas apresentarem coloração amarela após a incubação, isto indica que houve crescimento bacteriano em ambas. Logo conclui-se que a esterilização não foi efetiva.



11

Arquive a documentação de monitoramento da esterilização, guarde estes documentos de acordo com a legislação vigente.

10

Retire a etiqueta de cada ampola e cole-as em um livro de registro, anote o resultado referente a cada ampola em suas respectivas etiquetas.

9

FAÇA A LEITURA:



8

Passado o tempo descrito no rótulo do indicador biológico, retire as ampolas da Mini Incubadora 2i.

7

Após 15 minutos de aquecimento a Mini-Incubadora está pronta para o uso. Coloque as ampolas para incubar e siga o tempo descrito no rótulo do Indicador Biológico.

6

Segure a ampola delicadamente e dê uma leve batida na parte inferior, garantindo que o meio de cultura roxo entre em contato com o disco carregado de esporos no fundo da ampola.

5

Introduza a ampola no quebrador exclusivo, dobre levemente. Repita essa mesma operação na ampola controle.

4

Terminado o ciclo de esterilização, aguarde 10 minutos para que ocorra o resfriamento, abra o envelope e recupere a ampola.

3


Coloque uma das ampolas do indicador biológico em um envelope grau cirúrgico dentro da autoclave e realize o ciclo padrão de esterilização.

2

Faça a identificação de cada ampola, escreva os números de identificação do equipamento e da carga, assim como a data do processamento no rótulo da ampola.

1

Separe duas ampolas do indicador biológico 2i do mesmo lote. Uma ampola passará pelo ciclo de esterilização, a outra ampola servirá como controle. **Evite a queda das ampolas!**

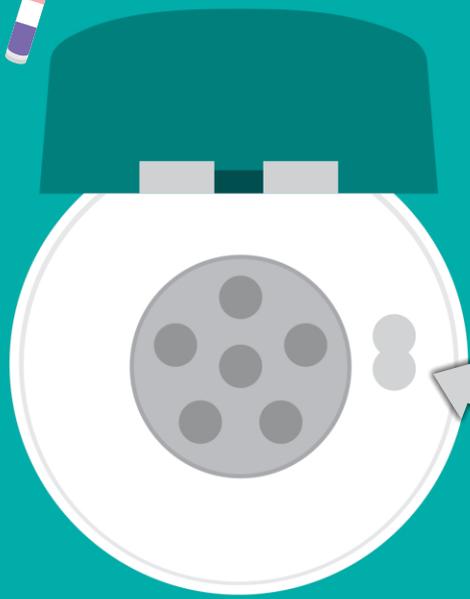

ATENÇÃO!

NÃO CHACALHE AS AMPOLAS!
 Na parte superior próximo a tampa há um filtro hidrofóbico que não deve ser molhado

